

m[®]
two

Revisionen
Retreatments
Retratamientos
Reprise de traitement



VDW[®]

**Endo
Easy
Efficient**[®]





VDW®

Anwendungshinweise

Mtwo® Revisionsfeilen 15/.05 und 25/.05

Anwendung bei 280 UpM

Feile: 15/.05: Max. Drehmoment 30 gcm (0,3 Ncm).

Feile: 25/.05: Max. Drehmoment 120 gcm (1,2 Ncm).

Mtwo® direct: R15/05 Einstellung A. R25/05 Einstellung C

- Den Kanaleingang mit einem Gates-Bohrer oder einem Ultraschallinstrument erweitern und die im koronalen Drittel befindliche Guttapercha entfernen. Bei Bedarf Guttapercha im mittleren und apikalen Drittel mit einem Lösungsmittel (z.B. Eukalyptusöl, Orangenöl) anweichen.
- Die Spitze der Revisionsfeile auf die Guttaperchafüllung setzen und rotieren lassen. Die Mtwo®-Revisionsfeilen haben eine schneidende Spitze, so dass die Instrumente leicht und ohne Druck in die Guttaperchafüllung eindringen können.
Keinen Druck auf die Instrumente ausüben.
- Mit zirkumferenten Feilenbewegungen die Wurzelfüllung sukzessive aus dem Kanal entfernen.

- Verwenden Sie für die apikale Sondierung Handinstrumente (z.B. C-Pilot-Feile) ISO 08, um den Wurzelkanal bis zur vollen Arbeitslänge zu sondieren.
- Nachdem die Arbeitslänge mit einem dünnen, flexiblen Handinstrument erreicht wurde, erweitern Sie den Wurzelkanal auf Arbeitslänge bis ISO 15.
- Erweitern Sie den Wurzelkanal mit konventionellen M_{two}® Instrumenten bis zur gewünschten Größe.

Beispiel der Aufbereitung:

M_{two}® R15/05 oder M_{two}® R25/05, Handinstrumente ISO 08, ISO 10, ISO 15, M_{two}® 10/04, M_{two}® 15/05, M_{two}® 20/06, M_{two}® 25/06 usw.

Am sichersten ist es, NiTi-Feilen nur einmal zu verwenden. Untersuchen Sie jedes Instrument auf Abnutzungserscheinungen und Torsionszeichen bevor sie es erneut in den Kanal einführen. Als Richtwert verwenden Sie die Instrumente bei schwer entfernbare Guttapercha in 3 - 4 Kanälen, bei leicht entfernbare Guttapercha in max. 6 - 8 Kanälen.



m[®]
two


CE
0123

VDW GmbH • P.O. Box 830954 • 81709 Munich, Germany
Tel. +49 89 627 34-0 • Fax +49 89 627 34-190
info@vdw-dental.com www.vdw-dental.com

VW000242 Rev. 1/Apr.08



VDW[®]

Mtwo[®] is licensed to VDW by

sweden & martina